



## Bien utiliser et entretenir son masque barrière lavable et réutilisable

### Comment mettre son masque ?



1  
Se laver les mains à l'eau et au savon avant toute manipulation du masque



2  
Prendre le masque par les élastiques



3  
Passer les élastiques derrière les oreilles ou la tête



4  
Ajuster le masque sur le haut du nez et en-dessous du menton



5  
Le masque est correctement posé

### Comment retirer son masque ?



1  
Se laver les mains à l'eau et au savon avant toute manipulation du masque



2  
Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques



3  
L'enlever en tenant les élastiques sans toucher la partie avant du masque



4  
Placer le masque À LAVER dans un petit sac en plastique propre pour le stocker avant lavage



5  
Se laver les mains à l'eau et au savon sans oublier de laver l'extérieur du contenant qui a été touché



Ne jamais remettre un masque qui a été retiré du visage

Le masque barrière est réutilisable et lavable jusqu'à 50 fois en cycle complet de lavage de 30 minutes à 60° (mouillage, lavage, rinçage) dans un filet de protection du linge. Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à 2 heures après la sortie du lavage.

### Port du masque : les erreurs à éviter



Porter son masque en-dessous du nez ou ne couvrir que la pointe du nez



Porter son masque sans recouvrir son menton



Toucher son masque une fois qu'il est positionné



Baisser le masque sur son menton en le portant comme un collier



Réutiliser un masque non lavé après l'avoir enlevé